



## CareSens N Premier (glucose), verkorte handleiding



Reinig de vingers en maak deze goed droog.



Neem een strip uit de koker en sluit de koker weer.




Plaats de strip met de juiste kant in de CareSens glucosemeter.



Wacht tot de meter aangeeft dat bloed kan worden toegevoegd.



Voer een vingerprik uit.

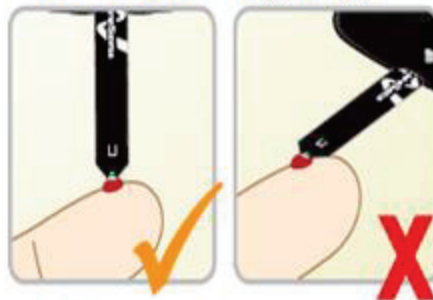

Houd de strip rechtop tegen de druppel aan, de strip zal zichzelf volzuigen.



De meting duurt ongeveer 5 seconden.



De waarde verschijnt in het scherm.