


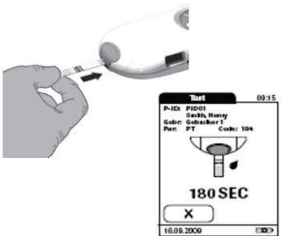






Verkorte handleiding CoaguChek Pro II



<p><u>Test benodigheden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CoaguChek PT Teststrip voor Pro II • Vingerprikker • Gaasje <p><u>Voor u begint:</u> Controleer of de juiste codechip in de meter geplaatst is.</p>		<p><u>Stap 1: Aanmelden gebruiker</u> Zet de meter aan. Scan uw personeelsnummer op de gebruikerspas.</p>	
<p><u>Stap 2: Aanmelden patiënt</u> Kies voor patiënttest en scan de barcode van de patiënt, of als dit niet kan, voer handmatig het patiëntnummer in.</p>		<p><u>Stap 3: Plaats teststrip</u> Plaats de teststrip wanneer het icoon verschijnt. Na enkele seconden begint de teller van 180 seconden af te tellen.</p>	
<p><u>Stap 4: Vingerprik</u> Voer een vingerprik uit en gebruik de eerste druppel bloed door de druppel tegen de teststrip te houden. De strip zal zich daarna zelf vullen.</p>		<p><u>Stap 5: Resultaat</u> Het resultaat wordt weergegeven. Het resultaat staat in de computer zodra het apparaat in het dockingstation is geplaatst.</p>	
<p>* Voer bij een patiënt met een onbekend patiëntnummer 1234567 in als patiëntnummer. Vermeld in het commentaar, via het "wolkje" de naam en geboortedatum, dan kan de order alsnog geregistreerd worden.</p> <p>* Bij een INR resultaat >8: neem een citraatbuis af en verstuur deze naar het laboratorium zodat een definitief resultaat kan worden gegenereerd.</p> <p>* Bij (een vermoeden van) een foute meting kan in het resultaatsscherm via het "wolkje" gekozen worden voor de volgende opmerkingen: Verkeerde patiënt, test wordt herhaald, Procedurefout. De uitslag zal dan niet doorgestuurd worden naar de aanvrager.</p>			