



Verkorte handleiding Spinit voor CRP bepaling

Test benodigheden:

- Test CD
- Capillaire pipet
- Gaasje

Voor u begint:

Haal de CD uit de koelkast en wacht tenminste 3 minuten voordat de folie geopend wordt.



Stap 1: Activeren CD

Verwijder de folie van de CD kort voor de bloedafname en leg de CD op een vlakke ondergrond. Duw de blister goed in met de duim. Gooi het folie nog niet weg, hier staat de barcode op.




Stap 2: Afname bloed

Voer een vingerprik uit en veeg de eerste druppel weg met een gaasje. Pak de pipet in het midden beet, niet bij de ballon. Houd de capillaire pipet in de tweede druppel bloed op de vinger tot deze gevuld is tot de rode lijn op de pipet. Verwijder eventueel overtollig bloed aan de buitenkant van de pipet met een gaasje.



Stap 3: Bloedmonster in de CD brengen

Zet de capillaire pipet rustig in de opening van de CD en leeg de pipet door het bovenste gedeelte van de pipet, de ballon, in te drukken. Verwijder het papier van de sticker en plak de sticker over de opening van de CD.

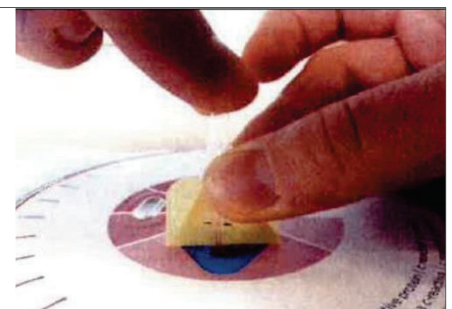

Stap 4: Uitvoeren bepaling

Selecteer de gebruiker in het apparaat. Druk volgende. Voer het BSN nummer van de patiënt in. Scan de barcode van de folie wanneer hier om gevraagd wordt. Druk op volgende, de lade zal dan openen. Plaats de CD. Het resultaat verschijnt na 4 minuten op het scherm. Verwijder de CD uit de Spinit en gooi de folie en pipet weg.

