



Afname- en verzendmedia Bacteriologie en Virologie, kliniek

	Afname en Verzendmedium	Bewaren na afname:	Illustratie
U	Urinebuis (olijfgroen) Bacteriële kweek algemeen, gistkweek (midstream urine) DNA onderzoek (PCR) (man:1 ^e straaIs urine) op <i>Chlamydia trachomatis</i> , Gonokokken, <i>Trichomonas vaginalis</i> . DIRECT NA LOZING BUIS VULLEN. EVENTUEEL URINE KOELBEWAREN, BINNEN 12 UUR NA LOZING IN BUIS. LET OP MINIMALE VULLIJN.	de buis na vullen omschudden 2 tot 25°C binnen 24 uur inleveren	
C	Universeel transportmedium / e Swab Liquid Amies standaard tip (dunne tip op aanvraag verkrijgbaar) Uitstrijken huid en slijmvliezen op: - bacteriële kweek algemeen, MRSA, BRMO - gistkweek (Candida) - genitaliën: hemolytische streptokokken, Gonokokken (kweek + resistentie), <i>Gardnerella vaginalis</i> . LET OP: voor diagnostiek van bacteriële vaginose verdient een preparaat de voorkeur. - DNA onderzoek (PCR) op o.a <i>Chlamydia trachomatis</i> , Gonokokken, <i>Trichomonas vaginalis</i> , luchtwegvirussen (w.o. Influenza), <i>Bordetella pertussis</i> (kinkhoest), <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>C. psittaci</i> , Herpes Simplex Virus en Varicella Zoster Virus	2 tot 25°C Voor kweek binnen 24 uur inleveren Voor DNA-onderzoek binnen 72 uur inleveren	Plaats de swab tot op de bodem van het transportmedium. Breek de swab af op het afbreekrandje. NB: de swab niet afknippen of hoger afbreken. Draai het dopje in het transportmedium De swab moet zijn vastgedraaid in het dopje
D	Preparaatglasje Uitstrijk voor bacteriële vaginose (flour vaginalis)		
E	Fecespotje Feces: bacterieel, parasitair en viraal onderzoek, wormeieren, <i>Helicobacter antigeentest</i> .	2 tot 8°C binnen 24 uur inleveren	
F	DFT-test (dual feces test) Feces: uitgebreid parasitologisch onderzoek (<i>Dientamoeba fragilis</i> en <i>Blastocystis hominis</i>)	18 tot 25°C binnen 24 uur inleveren	
H	Steriel potje Sputum, huidschilfers, nagels, etc: alle onderzoeken	2 tot 8°C binnen 24 uur inleveren	
I	CAPD zak CAPD-vloeistof: alle onderzoeken	2 tot 8°C	
J	Steriele spuit, moet afgedopt zijn* Punctaat: alle onderzoeken	Gewrichtspunctaten: 34 tot 36°C Overige: 2 tot 8°C	
K	Bactec bloedkweekflessen Bloed, beenmerg, ascites, CAPD-vloeistof, punctaat: Bacteriële kweek algemeen, Gistkweek, schimmelkweek	Opslag: 2 tot 25°C Na afname: kamertemperatuur binnen 24 uur inleveren	
M	Steriele (punt)buis, 8 ml Liquor	34 tot 36°C binnen 24 uur inleveren	
N	EDTA-buis, 7 ml Bloed/beenmerg PCR en TB kweek	2 tot 8°C binnen 24 uur inleveren	

*Spuiten met naald mogen vanwege ARBO regelgeving niet in behandeling worden genomen.