






## Verkorte handleiding Clinitek voor urinebepaling

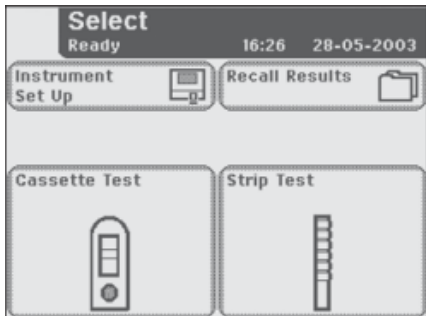

Kies in het hoofdmenu voor Striptest

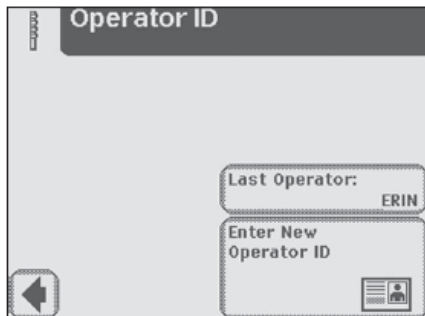

Kies voor Last Operator of Enter New Operator ID om in te voeren wie de meting uitvoert

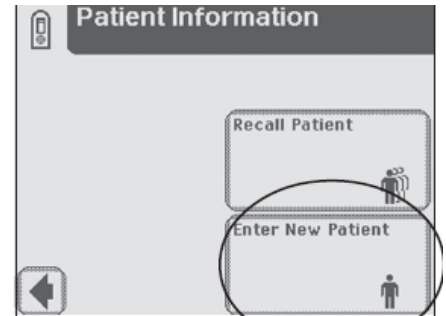


Kies voor Enter New Patient




Voer het BSN van de patiënt in



Zorg dat de striphouder met de stripzijde omhoog ligt en schoon is

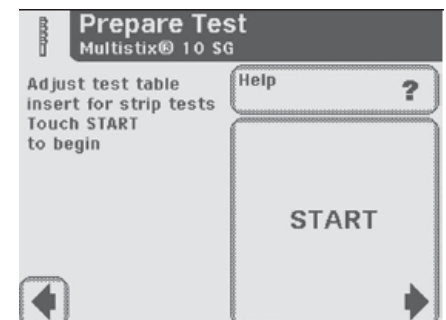

Leg klaar: 2 Tissues, teststrip en het urinemonster

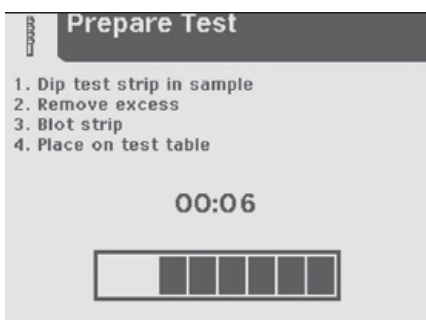

Zodra Start wordt ingedrukt is er 8 seconden om de volgende handelingen uit te voeren




Doop de teststrip in het urinemonster  
Zorg dat alle blokjes nat worden




Veeg de onderkant van de teststrip af aan een tissue



Plaats de teststrip in de houder met de blokjes omhoog. De teststrip wordt automatisch naar binnen getrokken

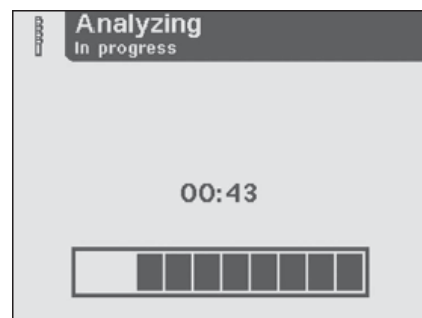

Na een korte kalibratie begint de meting  
De meting duurt 45 seconden.

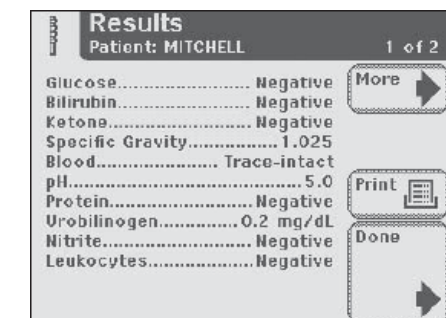

De resultaten worden weergegeven in het scherm. Verwijder de teststrip  
Maak de striphouder schoon met een nieuwe tissue.



## Verkorte handleiding Clinitek voor urinebepaling

### Onderhoud bij mogelijke vervuiling, minimaal 1 keer per week:

- Neem de striphouder uit de testtafel.
- Reinig de striphouder met handwarm water en een zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen.
- Droog de striphouder goed.
- Plaats de striphouder weer in de testtafel.

### Vervangen van de Printrol:

- Open de achterzijde door het donkergrijze uitsteeksel zachtjes omlaag te duwen en naar buiten te trekken.
- Open de bovenzijde van het apparaat door het lichtgrijze uitsteeksel in te drukken en omhoog te duwen.
- Breng de grijze hendel aan de zijkant van de printrol omhoog en verwijder het restant van de rol.
- Plaats een nieuwe rol, zodanig dat u in de rol kijkt en het papier recht langs de achterwand omhoog loopt.
- Leid het papier langs de printkop, en door de bovenzijde. Dit gaat makkelijker als u het uiteinde van het papier een beetje dubbel vouwt.
- Sluit de achterzijde van het apparaat, breng de grijze hendel weer in de neerwaartse positie en sluit de bovenzijde.
- Scheur het overschot van het papier af.