



## DCA vantage (HbA1c), verkorte handleiding



### Test benodigheden:

- HbA1c cartridge
- Capillair
- Gaasje

### Voor u begint:

Druk op een willekeurige plek op het beeldscherm van de DCA om deze te activeren.

### Stap 1: Afname bloed

Voer een vingerprik uit en veeg de eerste druppel weg met een gaasje.

Houd het capillair in de tweede druppel bloed op de vinger tot deze volledig gevuld is.

Verwijder eventueel overtollig bloed op de capillair door deze tegen een gaasje te houden.



### Stap 2: Inbrengen capillair in cartridge

Druk het capillair in de cartridge, de ronde kant moet hierbij aan de buitenkant zitten.



## DCA vantage (HbA1c), verkorte handleiding

### Stap 3: Scannen cartridge

Neem de cartridge zoals afgebeeld in uw hand.  
Houd de cartridge in de barcodelezer **boven de punt**.  
Beweeg de cartridge langs de punt naar onderen.  
Als de barcode is gelezen hoort u een **pieptoon**.



### Stap 4: Plaatsen cartridge

Open de klep en plaats de cartridge in de houder. Druk deze door tot u een **klik** voelt.  
Trek daarna de folie uit de cartridge.  
Sluit de klep om te starten.




### Stap 5: Invoeren gebruiker en patiënt

De DCA vraagt om een Patient ID: voer hier het BSN in van de patiënt.  
Voer bij Operator ID uw initialen in of bij intern gebruik laboratorium of ziekenhuis uw personeelsnummer in.  
Kies daarna rechts onderin voor Next.

### Stap 6: Uitvoeren HbA1c bepaling

De bepaling wordt automatisch uitgevoerd en duurt ongeveer 6 minuten.  
Voer ondertussen de gegevens van de patiënt in.  
Zodra de bepaling gereed is verschijnt de uitslag in het scherm.  
Print de resultaten door op het print-icoon te drukken.

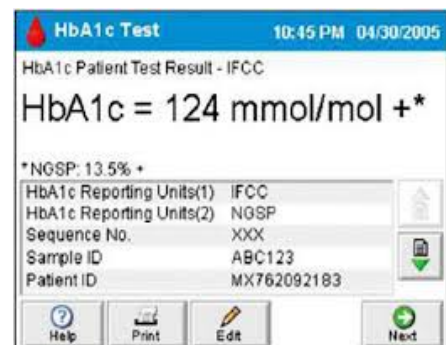

### Stap 7: Verwijderen cartridge

Houd de witte drukknop rechts naast de cartridge ingedrukt.  
Druk tegelijk de cartridge aan de houder naar rechts.  
Trek terwijl u de cartridge naar rechts houdt de cartridge uit de houder.

