






## HemoCue Hb201+, verkorte handleiding

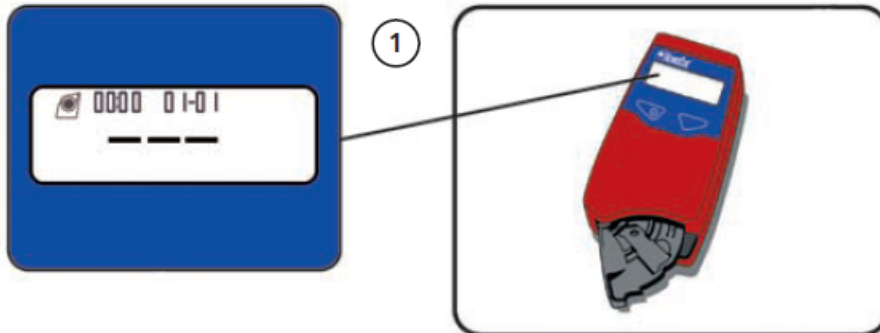


1) Zet het apparaat aan door de cuvettehouder in de laadpositie te plaatsen.  
Het display toont drie knipperende streepjes.

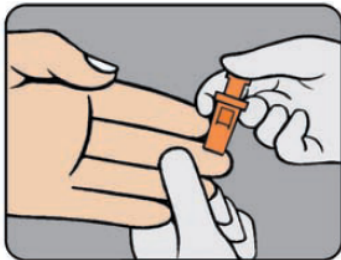

2) Maak de handen van de patiënt schoon met water (gebruik geen alcohol) en daarna goed droog.  
Oefen **lichte** druk uit in de richting van de vingertop en prik de vinger, bij voorkeur aan de zijkant van de vingertop.  
Veeg de eerste druppel bloed weg. De eerste druppel bloed is mogelijk verontreinigd met wondvocht.

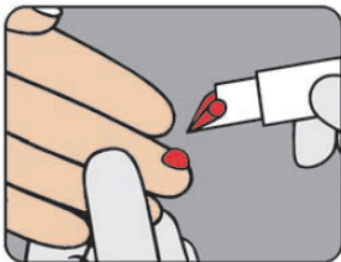

3) Vul het microcuvette volledig door deze tegen de druppel bloed aan te houden, door de capillaire werking zal deze vanzelf vullen. Veeg eventueel overtollig bloed aan de buitenkant van de microcuvette voorzichtig weg met een doekje.

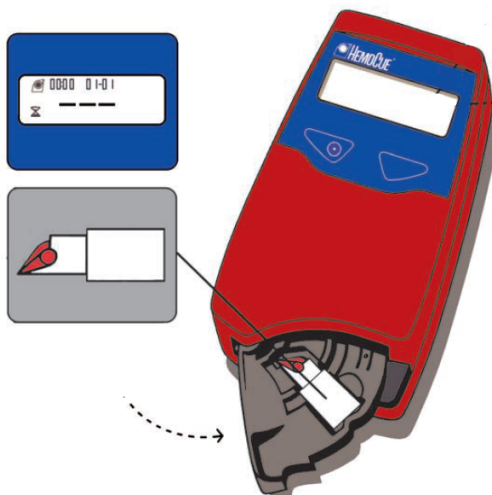

4) Plaats de cuvette in de cuvettehouder.  
Duw de cuvettehouder naar de meetpositie.  
Na 15 – 60 seconden verschijnt de Hemoglobine waarde in het display.  
Het resultaat wordt automatisch in het apparaat opgeslagen.